

メディカルホールドGB 装着方法

(手順①～④)



①左右を確認しましょう

Rは右です→

(※RIGHTの略)



←**Lは左**です

(※LEFTの略)

②右足に付けてみましょう (左足も付け方は同じです)



←このタグがある方を
剥がします



③かかとはにはめます



わかをかかとはに
矢印の方向に
はめるイメージで

④内くるぶしに向かってとめます



完成型



上図のようなバランスに
なっていたらOKです！
(正しいバランス、角度)

※下のような留め幅のバランスや角度が悪い場合や
違和感が出る時は微調整してください

悪い例①



悪い例②

